



ANERA



UN PRODUCTO PARA CADA PROCEDIMIENTO

Durante años, los odontólogos han tenido que trabajar con materiales inertes de resina y a base de materiales ZOE o han pagado demasiado por productos bioactivos. **Ya no.**

El exclusivo gel patentado de NeoMTA 2® le permite mezclar hasta obtener una masilla espesa o un sellador más fino, con un rendimiento que le sitúa en el camino hacia mejores resultados para el paciente.

Un producto para 13 procedimientos:

- ✓ Tapón pulpar indirecto
- ✓ Capuchón pulpar directo
- ✓ Pulpotomía parcial
- ✓ Revestimiento de la cavidad
- ✓ Base
- ✓ Pulpotomía
- ✓ Apexogénesis
- ✓ Reparación de la perforación
- ✓ Reabsorción
- ✓ Sellado
- ✓ Obturación
- ✓ Apexificación
- ✓ Relleno del extremo de la raíz

Debemos dar a los clínicos la flexibilidad de poder trabajar como quieran, sin comprometer la calidad de su trabajo.

- Carolyn Primus, PhD

Inventora de White ProRoot® MTA1, Grey MTA Plus®, NeoMTA Plus®, NeoMTA® 2, NeoSEALER™ Flo, NeoPUTTY™

¹ Patentado con el número de patente estadounidense 7.892.342, propiedad de DENTSPLY International Inc.

⁴ J Dent. 2014 May;42(5):517-33.

Una revisión de la bioactividad de los cementos hidráulicos de silicato de calcio. Niu LN, Jiao K, Wang TD, Zhang W, Camilleri J, Bergeron BE, Feng HL, Mao J, Chen JH, Pashley DH, Tay FR FR

NUESTROS TIEMPOS DE TRABAJO Y FRAGUADO SON MÁS EFICIENTES

NeoMTA 2® ha sido diseñado para ofrecer unas propiedades de manipulación favorables cuando se mezcla para obtener una consistencia de sellador o de masilla. El tiempo de trabajo puede ser ampliado si es necesario rehidratando el polvo con gel - dándole más tiempo para completar el procedimiento.




Cuando se mezcla para obtener una masilla



Cuando se mezcla con un sellador

MAYOR RADIOOPACIDAD

NeoMTA 2® frente a los principales competidores.

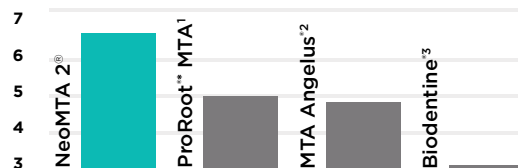

Todo mezclado a una masilla. RADIOOPACIDAD (mm equivalente Al)

Datos elaborados por Avalon Biomed.

² MTA Angelus® es una marca registrada de Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.

³ Biodentine® es una marca registrada de Septodont.

DIMENSIONALMENTE ESTABLE

Para asegurar un sellado completo, minimizando el riesgo de infiltración bacteriana.

NeoMTA 2 0,06% de expansión

ADA 57 std. ≤1% de contracción y ≤0,1% de expansión


NO TIÑE

- ✓ No decolora los dientes - **NUNCA.**
- ✓ NaOCl no causa decoloración.

RESISTENCIA INMEDIATA AL LAVADO

Permanece donde quieres para que puedas completar eficientemente el procedimiento, asegurando el beneficio bioactivo.

Con un **0% de pérdida de peso**, NeoMTA 2® es más estable que los principales competidores.

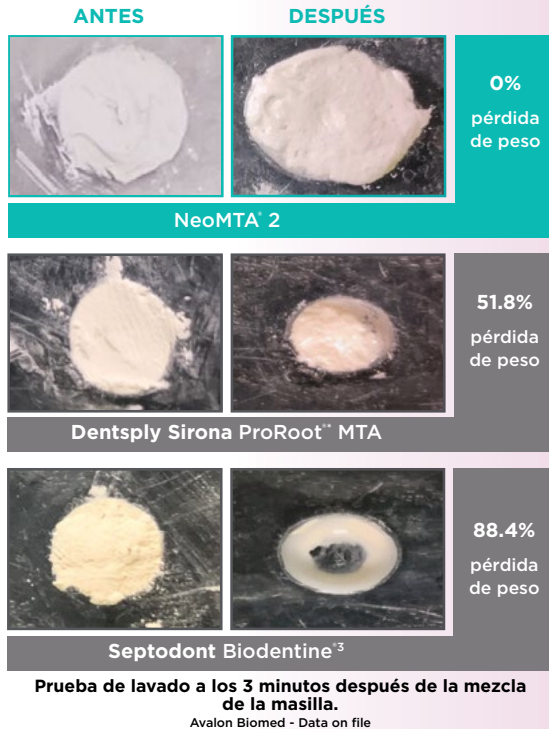

BIOACTIVIDAD BASADA EN MTA

Formas de hidroxiapatita para asegurar un sellado bioactivo.

pH ELEVADO


Para promover la respuesta osteogénica.

SIN RESINA

Para una máxima bioactividad.

A DIFERENCIA DE LA RESINA INERTE Y LOS MATERIALES ZOE, MTA PROPORCIONA UNA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA PROMOVER LA BIOACTIVIDAD Y FAVORECER LA CICATRIZACIÓN

- Tras la colocación, los iones de calcio e hidróxido se liberan del MTA, promoviendo la formación de hidroxiapatita (HA) en las superficies del MTA.
- Cuando la HA recubre la superficie, oculta el MTA subyacente para minimizar las reacciones de cuerpo extraño y favorecer las respuestas de cicatrización del tejido pulpar o periapical.

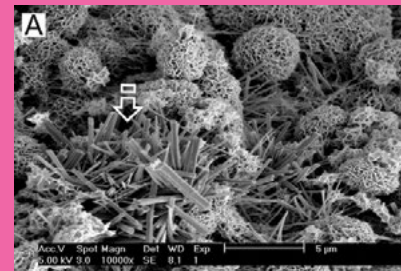

Cristales precipitados de fosfato cálcico dispersos en la superficie del cemento de silicato tricálcico hidratado⁴.

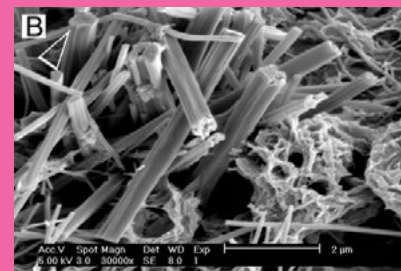


Imagen de gran aumento de los cristales de fosfato cálcico⁴.

NUESTROS PRODUCTOS *NeoMTA*® 2 DISPONIBLES

NeoMTA® 2

Kit de 0,5 g

Referencia: **ZNM05**

NeoMTA® 2

Kit de 1 g

Referencia: **ZNM10**

NeoMTA® 2

Kit de 2,5 g

Referencia: **ZNM25**

AHORA PUEDES AGILIZAR AÚN MÁS TU CONSULTA

con nuestra línea de biocerámicos premezclados



NeoSEALER® Flo

El sellador bioactivo premezclado más eficiente, eficaz y económico del mercado.



NeoPUTTY®

La masilla bioactiva más radiopaca de su clase.



DE ODONTÓLOGOS
PARA ODONTÓLOGOS

hola@zarc4endo.com

www.zarc4endo.com



ZARC