

# Puntas de gutapercha para conductos

## INSTRUCCIONES DE USO

La gutapercha es uno de los materiales de restauración dental. Los dentistas lo usan como relleno de conductos cuando están tratando enfermedades endodónticas. Nuestra gutapercha obtuvo el premio de ShangHai New Excellence Product.

1. Es espícula blanca (o rosa), sin olor, sin irritación con la desinfección.
2. Es impermeable a los rayos X, observamos claramente el relleno del conducto.
3. Tiene cierta firmeza. Puede entrar fácilmente en el conducto fino y obstruido.
4. Su diámetro y tamaño están de acuerdo con el ensanchador del conducto.

## COMPOSICIÓN

Gutapercha natural de alta calidad, óxido de zinc.

## 1) INDICACIONES DE USO

Se usa en el conducto para obturar cuando los dentistas realizan endodoncias.

## 2) CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

## 3) ADVERTENCIAS

- Debe desinfectarse con alcohol antes de usarlo.
- No debe aplicarse a pacientes alérgicos.

## 4) ESPECIFICACIONES

- Se produce de acuerdo con ISO 6877. Se puede personalizar el tamaño de acuerdo con los requisitos de los conductos con variedades de tipos.

Tamaño de Gutapercha Zarc 0.04 y 0.06				
Especificación estándar	.04/25	.04/30	.06/25	.06/30
Longitud (mm)	28	28	28	28
Diámetro punta (mm)	0.25	0.30	0.25	0.30

**Tamaño de Gutapercha especial Zarc**

Denominación	X-Fine	Fine
Longitud (mm)	28	28
Diámetro punta (mm)	0.14	0.17

**Tamaño de Gutapercha BlueShaper®**

Denominación	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
Longitud (mm)	28	28	28	28	28
Diámetro punta (mm)	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50

**Tamaño de Gutapercha Excalibur®**

Denominación	E20	E25	E35	E45
Longitud (mm)	28	28	28	28
Diámetro punta (mm)	0.20	0.25	0.35	0.45

**Tamaño de gutapercha SlimShaper®**

Denominación	ZS1	ZS2	ZS3
Longitud (mm)	28	28	28
Diameter de punta (mm)	0.15	0.20	0.25

**Tamaño de gutapercha ApicalShaper®**

Denominación	Z30	Z35	Z40	Z50
Longitud (mm)	28	28	28	28
Diámetro de punta (mm)	30	35	40	50



Shanghai Xing Yu Medical Equipment Co., Ltd  
3 Floor, Building 21, No. 3825 Xin Zhuan Road,  
Dong Jing Town, Shanghai, CHINA  
hola@zarc4endo.com • www.zarc4endo.com



Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Germany



**Importer for the EU:**  
IPG Dental Group S.L.  
C. Marqués de San Esteban N° 8, A y B  
33206 Gijón, Asturias (Spain)

## 5) ALMACENAJE Y CADUCIDAD

- Almacénese en un lugar fresco. Manténgase alejado de la luz solar directa, gases irritantes y humo.
- Almacénese según los requisitos.
- Tres años de vida útil.

## 6) EMBALAJE

- Paquete de caja: 100 piezas/caja o 60 piezas/caja según tamaño de gutapercha. La etiqueta y firma con prueba de conformidad en la caja.



Shanghai Xing Yu Medical Equipment Co., Ltd  
3 Floor, Building 21, No. 3825 Xin Zhuan Road,  
Dong Jing Town, Shanghai. CHINA  
hola@zarc4endo.com • www.zarc4endo.com



Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Germany



**Importer for the EU:**  
IPG Dental Group S.L.  
C. Marqués de San Esteban N° 8, A y B  
33206 Gijón, Asturias (Spain)