

# Puntas de papel absorbentes

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Las puntas de papel son una espícula blanca y tienen una tenacidad e intensidad definidas. Pueden entrar fácilmente en el conducto exiguo y doblado.
2. Absorben fuertemente la saliva del tejido y hacen que se seque rápidamente.
3. Deben mantenerse recto, incluso cuando se sumergen en una solución antimicrobiana o desinfectante durante el tratamiento de endodoncia.
4. Los tamaños de su diámetro están de acuerdo con las limas de endodoncia.
5. ESTÉRILES: serán irradiadas con rayos gamma de 25 kG y después del empaque.

Solo para uso odontológico.

Elija el mismo tamaño que las limas dentales y use pinzas para cortar las puntas de papel para la limpieza del conducto. De un solo uso.

## COMPOSICIÓN

Papel de algodón.

### 1) INDICACIONES DE USO

Se usan para absorber el líquido del tejido del conducto de la cavidad oral cuando los dentistas realizan la endodoncia.

### 2) CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

### 3) ESPECIFICACIÓN

| Tamaño puntas de papel Zarc 0.04 y 0.06 |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Especificación estándar                 | .04/25 | .04/30 | .06/25 | .06/30 |
| Longitud (mm)                           | 28     | 28     | 28     | 28     |
| Diámetro de punta (mm)                  | 0.25   | 0.30   | 0.25   | 0.30   |

| Punta de papel tamaño especial de Zarc |        |      |
|--|--------|------|
| Denominación                           | X-Fine | Fine |
| Longitud (mm)                          | 28     | 28   |
| Diámetro de punta (mm)                 | 0.14   | 0.17 |

| Tamaño puntas de papel BlueShaper® |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Denominación                       | Z3   | Z4   | Z5   | Z6   | Z7   |
| Longitud (mm)                      | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   |
| Diámetro de punta (mm)             | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |

| Tamaño puntas de papel Excalibur® |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Denominación                      | E20  | E25  | E35  | E45  |
| Longitud (mm)                     | 28   | 28   | 28   | 28   |
| Diámetro de punta (mm)            | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |

| Tamaño puntas de papel SlimShaper® |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| Denominación                       | ZS1  | ZS2  | ZS3  |
| Longitud (mm)                      | 28   | 28   | 28   |
| Diámetro de punta (mm)             | 0.15 | 0.20 | 0.25 |

| Tamaño puntas de papel ApicalShaper® |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Denominación                         | Z30 | Z35 | Z40 | Z50 |
| Longitud (mm)                        | 28  | 28  | 28  | 28  |
| Diámetro de punta (mm)               | 30  | 35  | 40  | 50  |

## 5) ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

- Mantener por debajo de 40°C, sin aire, en un lugar sin viento y no corrosivo. La altura máxima de acumulación es de 5 cajas.
- La vida útil de las puntas de papel es de 3 años.

## 6) EMBALAJE

- Paquete de caja: 100 piezas/caja o 180 piezas/caja según el tamaño de la punta de papel. La etiqueta y firma con prueba de conformidad en la caja.

## 7) NOTA ESPECIAL

- Deje de usarlo cuando cambie el color (el color normal es blanco).
- Si la punta de papel está rota, no la use.
- De un solo uso.
- Úselo a tiempo después de que se haya abierto el paquete.

## 8) ESTERILIZACIÓN

- Almacenar según pedido, tres años de plazo de esterilización.



Shanghai Xing Yu Medical Equipment Co., Ltd  
3 Floor, Building 21, No. 3825 Xin Zhuan Road,  
Dong Jing Town, Shanghai. CHINA  
hola@zarc4endo.com • www.zarc4endo.com



Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Germany



**Importer for the EU:**  
IPG Dental Group S.L.  
C. Marqués de San Esteban Nº 8, A y B  
33206 Gijón, Asturias (Spain)