

Opacal

pH alto para
apósito temporal
de conductos



Opacal es una pasta de hidróxido de calcio radiopaca, cremosa y lista para usar, con un pH superior a 12. La entrada de la pasta al conducto está garantizada por una punta diseñada para aplicación.



SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS


Opacal

Diseñado para apósitos temporales de conductos con un alto pH (>12), alta radiopacidad (> 3 mm de aluminio) y consistencia cremosa. Su composición acuosa y la liberación iónica rápida relacionada (R.G. Fava y W.P. Saunders - Pastas de hidróxido de calcio: clasificación e indicaciones clínicas) ofrecen un rendimiento en procedimientos de poca duración. La consistencia de uso inmediato y la punta de aplicación fina ofrecen una cómoda entrada de la pasta y reducen la necesidad de instrumentos Lentulo.


Composición: hidróxido de calcio 30%, sulfato de bario 24%, excipiente.

Principales beneficios:


- pH alto
- Alta radiopacidad
- Consistencia cremosa
- Fácil y cómoda entrada de pasta
- Fácil de quitar (material no endurecedor)
- Liberación iónica rápida (composición acuosa)

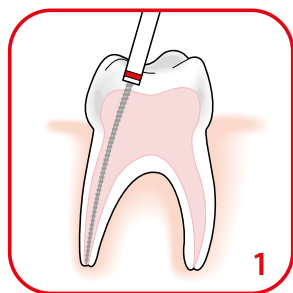

1. Prepara, limpia y seca meticulosamente el conducto.

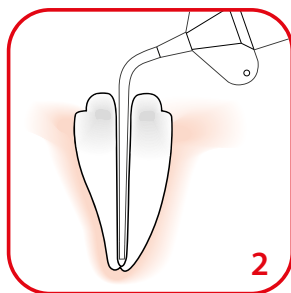

2. Llena el conducto con Opacal desde la porción apical de la raíz hacia afuera. Utiliza la punta adjunta y mantente al menos 2 mm alejado del ápice.

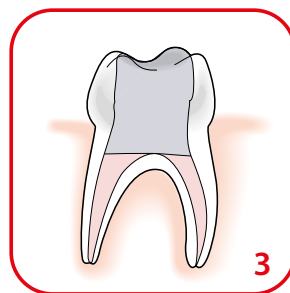

3. Rellena la cavidad con un material de obturación temporal para un sellado hermético durante el intervalo de sesiones.



Opacal Pasta de hidróxido de calcio **REF 11020**

- 1 Jeringa de 3 ml
- 10 Puntas de aplicación de un solo uso
- 1 Mango para el dedo

Opacal refill **REF 11022**

- 10 Puntas de aplicación de un solo uso



Produits Dentaires SA
pd-dental.com